



nosiboo^{*}go[®]
portable nasal aspirator

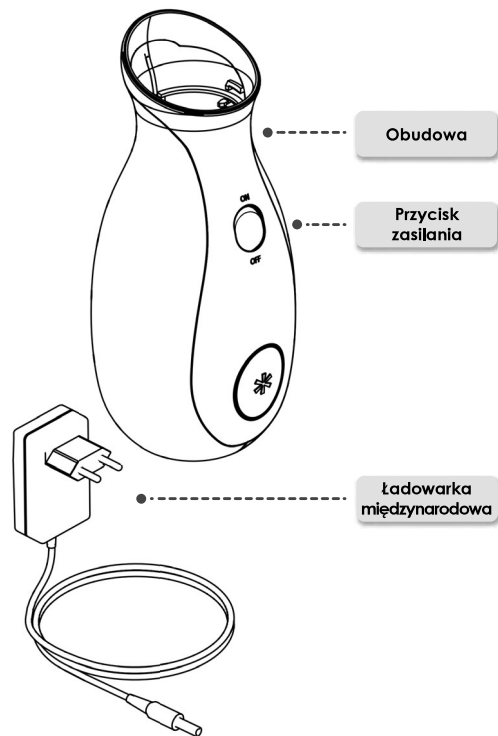

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Głowica Penguin

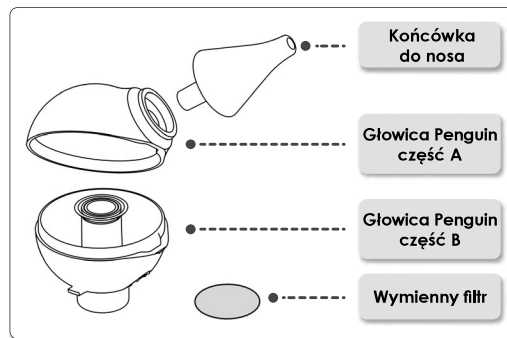

Wstęp

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup naszego aspiratora do nosa Nosiboo Go. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi, co pozwoli Ci przez wiele lat wydajnie korzystać z Twojego aspiratora. Prosimy o zachowanie tej instrukcji w celach gwarancyjnych.

Spis treści

1. Zawartość opakowania	425
2. Instrukcje bezpieczeństwa	426
3. Zamierzone przeznaczenie	432
4. Przed użyciem	433
5. Instrukcja użycia	435
6. Czyszczenie	437
7. Przechowywanie i konserwacja	438
8. Przewodnik rozwiązywania problemów	440
9. Ważne informacje na temat akumulatora	440
10. Uwagi na temat ochrony środowiska	440
11. Specyfikacje techniczne	441
12. Akcesoria, części zamienne	441
13. Przewodnik usuwania błędów	442
14. Certyfikat Gwarancji Międzynarodowej	443


Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia.

Nosiboo Go jest wyrobem medycznym higienicznym. Jesteś uprawniony do zwrotu, jeśli urządzenie jest nieuszkodzone oraz końcówka do nosa jest nierozpakowana. Ze względu na higienę nie wymieniamy produktu wyjętego z folii. Wskazówki i obowiązujące przepisy: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu 2011/83/EU § 16 (e) Republika Austrii: FAGG: § 18 (1) 5. Węgry: 45/2014. (II. 26.) rozporządzenie rządu § 29 (1) (e). Po zarejestrowaniu urządzenia otrzymasz w prezencie kupon zniżkowy na kolejne zakupy. Można z niego skorzystać w sklepie internetowym producenta Nosiboo Go. https://product_registration.nosiboo.eu/

Attract Kft. jest producentem wyrobów medycznych z certyfikatem ISO 13485. Ten produkt to wyrób dziedziczny (MDD Legacy Device).

Actor EUDAMED No.: HU-MF-000004252

1. Opakowanie zawiera

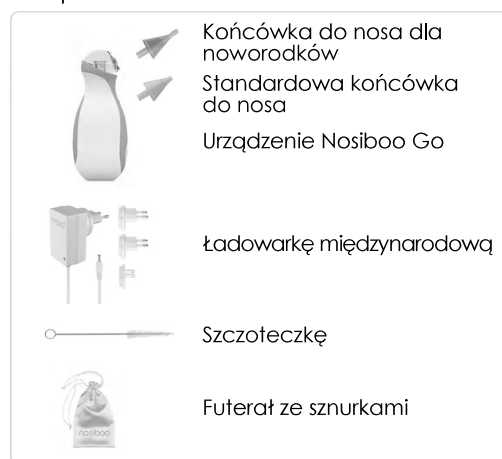

2. Instrukcje bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa



Zastosowane części typu BF (zwiększona ochrona przez porażeniem elektrycznym)



Urządzenie medyczne klasy IIa



Nazwa i adres producenta



Przeczytaj Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



Przeczytaj Instrukcję obsługi online



Tylko do użytku domowego



GTIN – Globalny Numer Jednostki Handlowej (UDI-DI)



Numer seryjny (numer serii)



Numer artykułu (numer typu)



Numer partii (identyfikator produkcji)



Należy przechowywać w suchym miejscu



Obudowa chroni przed dostaniem się do wnętrza urządzenia ciał stałych o wielkości powyżej 12,5 mm, nie chroni jednak przed przenikaniem cieczy.



Niebezpieczny odpad



Akumulator



Ostrzeżenie



TAK RÓB!



Pouczenie




TAK NIE RÓB!

Zasysanie wody za pomocą elektrycznego aspiratora do nosa Nosiboo spowoduje utratę gwarancji.

Nie zasysaj wody za pomocą urządzenia!



Nie używaj aspiratora do nosa do płukania nosa!

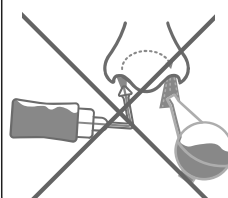

Ogólne zastosowanie





Korzystaj z urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. Nieprawidłowe użycie może zagrażać życiu.

Urządzenie powinno być używane jedynie przez dorosłych.

W przypadku niespodziewanej usterki lub błędu, natychmiast wyłącz urządzenie.





Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem, TO NIE JEST ZABAWKA! (Kabel zasilający może z łatwością owinąć się wokół szyi dziecka.)

Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru w obecności dzieci.

Nie używaj urządzenia w łazience lub w jakimkolwiek innym wilgotnym lub mokrym środowisku.

Nie dotykaj ładowarki mokrymi rękami.

W trakcie korzystania z aspiratora nie zakrywaj otworów wentylacyjnych znajdujących się z tyłu urządzenia.



Używaj urządzenia wyłącznie z ładowarką dostarczoną przez producenta. Niezastosowanie się do tego grozi ryzykiem pożaru.

Urządzenie jest przeznaczone do użycia wyłącznie w celu usunięcia wydzieliny z nosa dziecka. Nie powinno być używane do jakichkolwiek innych celów.



Jeśli zauważysz zaczerwienienie na skórze nosa dziecka, skonsultuj się z lekarzem, który doradzi Ci, kiedy i jak często czyścić nos dziecka.

Przechowuj urządzenie i jego akcesoria z daleka od zasięgu dzieci.

Upewnij się, że wszystkie części są odpowiednio połączone przez użyciem urządzenia.

Upewnij się, że obudowa i głowica Penguin nie są uszkodzone lub pęknięte.



Używaj urządzenia wyłącznie z głowicą Penguin dostarczoną przez producenta.

W trakcie działania urządzenia jego podstawa powinna być skierowana do dołu.



Zawsze wyłącz urządzenie po użyciu poprzez wciśnięcie przycisku zasilania.

Zawsze dokładnie wyczyść i wysusz głowicę Penguin po użyciu.

Do mycia końcówki do nosa użyj szczoteczki.

Przeczytaj i zastosuj się do instrukcji zawartych w sekcji "Ważne informacje na temat akumulatora".

Przeczytaj i zastosuj się do instrukcji zawartych w sekcji "Uwagi na temat ochrony środowiska", jeśli chcesz wyrzucić urządzenie lub jakkolwiek jego część.



Nie wkładaj końcówek do ust lub uszu dziecka.

Nie używaj siły i nie wkładaj końcówek zbyt daleko do nosa.

Nie napieraj końcówką na ściany nozdrza!

Nie używaj urządzenia, jeśli Twoje dziecko ma stan zapalny lub krwawi z nosa. Jeśli wystąpi ból lub krwawienie, zaprzestań używania urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.



Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz, że głowica Penguin jest uszkodzona. Wymień uszkodzoną część. (Listę części zamiennych możesz znaleźć w sekcji: "Akcesoria, części zamienne".)

Nie używaj więcej niż 5 ml roztworu fizjologicznego soli, aby pozbyć się suchej lub bardzo gęstej wydzieliny z nosa. Nadmiar płynu w głowicy Penguin wydostanie się przez otwory z tyłu urządzenia.

Urządzenie nie powinno być używane w warunkach klinicznych lub instytucjonalnych. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Nie podłączaj głowicy Penguin do innych urządzeń.

Nie używaj urządzenia bez elementu filtrującego.

Podczas używania nie obracaj urządzenia do góry nogami.

Podczas ładowania nie wolno korzystać z urządzenia.

Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie



Chroń ładowarkę przed uszkodzeniem.



Przechowuj ładowarkę z daleka od źródeł ciepła (np. pieca, grzejnika lub kaloryfera), ponieważ może to spowodować szkody w izolacji.

Wyłącz urządzenie w trakcie składania, rozkładania i czyszczenia głowicy Penguin.



Nie skręcaj ładowarki, nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie, aby uniknąć uszkodzeń. Uszkodzony przewód może spowodować porażenie prądem.

Nie usuwaj śrub mocujących z obudowy. Nie przebudowuj urządzenia w jakichkolwiek innych celach. Może to zagrażać życiu.

Kiedy rozkładasz głowicę Penguin w celu czyszczenia, nie zostawiaj jej części w zasięgu dzieci. Dzieci mogą żuć lub połknąć małe części.

Do czyszczenia części nie używać zmywarki, wrzącej wody, kuchenki mikrofalowej, generatora pary ani sterylizatora do butelek, ponieważ części mogą zdeformować się pod wpływem ciepła!

Nie myj obudowy ani ładowarki wodą lub jakimkolwiek innym płynem. Nie dotykaj ładowarki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem lub awarię.



Upewnij się, że wszystkie części są dokładnie wysuszone przed kolejnym użyciem.

Zawsze odłącz ładowarkę z gniazdka po ładowaniu urządzenia.



POUCZENIE



Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego oraz gorąca.

Źródło zasilania



OSTRZEŻENIE



Używaj urządzenia wyłącznie z ładowarką dostarczoną przez producenta. Niezastosowanie się do tego grozi ryzykiem pożaru.

W czasie ładowania trzymaj urządzenie z dala od dzieci.

Chroń ładowarkę przed uszkodzeniem.

Wylącz urządzenie w trakcie składania, rozkładania i czyszczenia głowicy Penguin.

Ładowarka powinna być używana wyłącznie we wnętrzu budynku.

Upewnij się, czy ładowarka jest kompatybilna z gniazdkiem elektrycznym.



OSTRZEŻENIE



Nie używaj ładowarki, jeśli jest pęknięta lub uszkodzona.

Nie skręcaj przewodu ładowarki i nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów, ponieważ uszkodzony kabel może spowodować porażenie prądem.





Jeśli nie używałeś urządzenia przez dłuższy czas, upewnij się, że naładowałeś je przed użyciem.

Zawsze odłącz ładowarkę z gniazdka po ładowaniu urządzenia.

Kiedy nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, warto utrzymywać je w stanie naładowanym, ładując co najmniej co 3 miesiące, aby wydłużyć życie akumulatora.





Podczas ładowania nie należy używać urządzenia.

3. Zamierzone przeznaczenie

Aspirator do nosa Nosiboo Go został zaprojektowany w celu usuwania wydzieliny z nosa dziecka. Głowica Penguin posiada opatentowany design, który zapobiega przedostawaniu się wydzieliny do wnętrza urządzenia.

Cele korzystania:

- * zapewnienie oddychania przez nos u niemowląt
- * zwalczanie symptomów przeziębień dziecięcych poprzez oczyszczanie nosa z wydzieliny
- * zwalczanie symptomów alergii wieku dziecięcego poprzez oczyszczanie nosa z wydzieliny

Nie używaj urządzenia w następujących przypadkach:

- * jeśli dziecko choruje na hemofilię
- * jeśli często występuje u dziecka krwawienie z nosa z powodu rozszerzonych naczyń w przegrodzie nosowej
- * jeśli dziecko przyjmuje leki rozrzedzające krew
- * w przypadku wrodzonych wad rozwojowych (np. rozszczep podniebienia)





Urządzenie powinno być używane jedynie przez dorosłych.



OSTRZEŻENIE



Urządzenie jest przeznaczone do użycia wyłącznie w celu usunięcia wydzieliny z nosa dziecka. Nie powinno być używane do jakichkolwiek innych celów.


4. Przed użyciem

1. Ładowanie urządzenia


a) Podłącz kabel ładujący do złącza znajdującego się z tyłu obudowy urządzenia.



b) Podłącz drugi koniec ładowarki do gniazdka o napięciu 100-240V. Użyj wtyczki odpowiedniej do gniazdka.

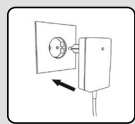

Ładowanie trwa, gdy wskaźnik LED na ładowarce świeci na czerwono. Ładowanie jest kompletne, gdy wskaźnik zmienia barwę na zieloną.

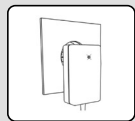


2. Montowanie głowicy Penguin



Używaj oryginalnych części Nosiboo!
Nasze aspiratory do nosa działają skutecznie tylko z oryginalnymi częściami i akcesoriami Nosiboo.

a) Wyczyść i wysusz części głowicy Penguin.


Głowica Penguin część A

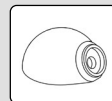

Głowica Penguin część B




Końcówka do nosa

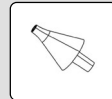

b) Umieść części głowicy Penguin w odpowiedniej pozycji.



c) Wciśnij końcówkę na miejsce.

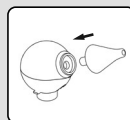


Końcówka do nosa dla
noworodków: 0-6 miesięcy
(wiek dziecka)



Standardowa końcówka
do nosa: 6 miesięcy i
więcej

3. Przyłącz głowicę Penguin do obudowy urządzenia.

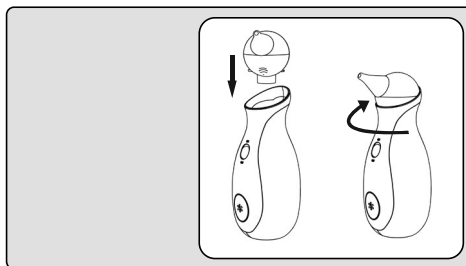

4. Urządzenie jest gotowe do użycia.



Upewnij się, czy ładowarka jest kompatybilna z gniazdkiem elektrycznym. Niezastosowanie się do tego może spowodować porażenie prądem lub pożar.



Jeśli nie używałeś urządzenia przez dłuższy czas, upewnij się, że naładowałeś je przed użyciem.

Wyczyść części głowicy Penguin przed użyciem.

Upewnij się, że wszystkie części są dokładnie wysuszone przed kolejnym użyciem.



POUCZENIE



Nie zaczynaj ponownego ładowania urządzenia zaraz po tym, jak je naładowałeś.

Nie używaj urządzenia bez elementu filtrującego.

5. Instrukcja użycia

1. Przytrzymaj dziecko w stabilnej pozycji siedzącej.

Posadź dziecko na swoich kolanach, weź je w ramiona lub posadź je w pozycji pionowej, podpierając jego plecy poduszką. Możesz również posadzić je w bujaku lub krzeselku niemowlęcym.



2. Umieść czystą, wysuszoną końcówkę w nozdrzu dziecka.

W czasie korzystania z urządzenia jego podstawa powinna być skierowana do dołu.

UWAGA:
Nie przyciskaj i nie blokuj drugiego nozdrza podczas korzystania z aspiratora.



3. Włącz urządzenie za pomocą przycisku zasilania.

UWAGA: W czasie, gdy nie korzystasz z urządzenia, wyłącz je.

UWAGA: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 30 min. ciągłego działania, ale może być uruchomione ponownie, zależnie od poziomu naładowania akumulatora.



4. Delikatnie poruszaj urządzeniem, by upewnić się, że dotarłeś do wszystkich obszarów nozdrza.

RADA: Sugerowany czas użycia aspiratora to 10 sekund na każde nozdrze.

RADA: Sucha, bardzo gęsta wydzielina może być usunięta z pomocą łagodnego, fizjologicznego roztworu soli. Po użyciu roztworu odczekaj kilka minut, wytrzyj wypływający nadmiar płynu chusteczką higieniczną, a następnie użyj aspiratora.

UWAGA: Nie używaj za jednym razem więcej niż 5 ml fizjologicznego roztworu soli. Głowica Penguin może bezpiecznie pomieścić tylko taką ilość płynu i tylko wtedy zapobiega przedostaniu się wydzieliny do wnętrza urządzenia.

5. Wyłącz urządzenie po użyciu za pomocą przycisku zasilania.

UWAGA:
Zawsze wyłącz urządzenie po użyciu.



RADA: Aspirator do nosa Nosiboo Go może być stosowany kilka razy dziennie. Twoim ogólnym celem powinno być zapewnienie swobodnego oddechu Twojemu dziecku. Zalecane jest czyszczenie dróg oddechowych dziecka zawsze po jego przebudzeniu, przed snem oraz karmieniem.

UWAGA: Krople do nosa i inne preparaty powinny być używane zgodnie z zaleceniami lekarza.



OSTRZEŻENIE



Urządzenie powinno być używane jedynie przez dorosłych.



OSTRZEŻENIE



Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem, TO NIE JEST ZABAWKA!

W trakcie korzystania z aspiratora nie zakrywaj otworów wentylacyjnych znajdujących się z tyłu urządzenia.

Nie używaj urządzenia w łazience lub w jakimkolwiek innym wilgotnym lub mokrym środowisku.

Nie dotykaj ładowarki mokrymi rękami.



POUCZENIE



Upewnij się, że wszystkie części są dokładnie wysuszone przed kolejnym użyciem.

Zawsze wyłącz urządzenie po użyciu poprzez wciśnięcie przycisku zasilania.

Po użyciu, jeśli akumulator urządzenia właśnie się wyladował, odczekaj kilka minut zanim urządzenie ochłodzi się i następnie zacznij ładowanie.



POUCZENIE



Podczas używania nie obracaj urządzenia do góry nogami.

Nie używaj urządzenia bez elementu filtrującego.

Nie używaj więcej niż 5 ml roztworu fizjologicznego soli. Nadmiar płynu wydostanie się przez otwory z tyłu urządzenia.

6. Czyszczenie


1. Odtłącz głowicę Penguin od obudowy urządzenia, odtłącz końcówkę, następnie otwórz obudowę głowicy Penguin.



2. Umyj końcówkę i obudowę Penguin w letniej wodzie z płynem do mycia naczyń i pozostaw do wyschnięcia.



3. Do mycia końcówki użyj szczoteczki.

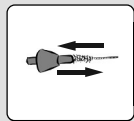

4. Wyczyść obudowę urządzenia suchą, miękką szmatką; nie używaj żadnych płynów, detergentów ani chemikaliów.





OSTRZEŻENIE



Wyłącz urządzenie przed składaniem, rozkładaniem i czyszczeniem głowicy Penguin.



OSTRZEŻENIE



Nie myj obudowy ani ładowarki wodą lub jakimkolwiek innym płynem.

Nie dotykaj ładowarki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie.



POUCZENIE



Dokładnie wyczyść głowicę Penguin po użyciu.

Upewnij się, że wszystkie części są dokładnie wysuszone przed kolejnym użyciem.

Jeśli z powodu nieprawidłowego użycia płyn dostanie się do wnętrza urządzenia, upewnij się, że aspirator jest całkowicie suchy przed kolejnym użyciem.



POUCZENIE



Nie rozmontowuj obudowy urządzenia.

Aby uniknąć uszkodzeń, upewnij się, że obudowa urządzenia nie jest narażona na promieniowanie ciepłe.

7. Przechowywanie i konserwacja

Przechowywanie

1. Przechowuj urządzenie możliwie w taki sposób, by przycisk zasilania nie był dociskany przez żaden obiekt, aby zapobiec samoczynnemu włączeniu się urządzenia.
2. Przechowuj urządzenie w osłoniętym miejscu, gdzie będzie chronione przed kurzem i uszkodzeniami (np. w szafce).

UWAGA:

Nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. Nie zostawiaj go w pojeździe, gdyż może się tam przegrzać.

UWAGA:

Zalecana temperatura przechowywania dla akumulatora urządzenia wynosi 10-30°C. Niepoprawne warunki przechowywania mogą spowodować spadek w wydajności urządzenia.

UWAGA:

Zalecane jest włączenie i naładowanie urządzenia co najmniej co 3 miesiące, aby utrzymać wydajność akumulatora.

Konserwacja

Pod głowicą Penguin znajduje się specjalny element filtrujący, który zapobiega przedostawaniu się twardych elementów i kurzu do wnętrza urządzenia. W przypadku spadku wydajności, zalecamy sprawdzić stan filtra. Jeśli jest brudny lub zatkany, należy go wymienić na zapasowy filtr. (Listę części zamiennych znajdziesz w sekcji: "Akcesoria, części zamienne".) **Informacje o Nosiboo Go Accessory Set znajdziesz na: www.nosiboo.eu**



OSTRZEŻENIE



Chroń ładowarkę przed uszkodzeniem.

Trzymaj ładowarkę z dala od źródeł gorąca.



OSTRZEŻENIE



Po wyczyszczeniu nie zostawiaj części rozmontowanej głowicy Penguin w zasięgu dzieci.

Nie używaj uszkodzonej ładowarki, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu ładowarki, ponieważ uszkodzony przewód może spowodować ryzyko pożaru.



POUCZENIE



Upewnij się, że wszystkie części są dokładnie wysuszone przed kolejnym użyciem.

Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego oraz gorąca.

Jeśli nie używałeś urządzenia przez dłuższy czas, upewnij się, że naładowałeś je przed użyciem.

8. Przewodnik rozwiązywania problemów

Awaria	Urządzenie nie włącza się.
Przyczyna	Urządzenie nie jest naładowane.
Rada	Podłącz ładowarkę do urządzenia, a następnie do gniazdka o napięciu 100-240 V.

Awaria	Siła ssania zmniejszyła się.
Przyczyna	Głowica Penguin jest zablokowana lub została nieprawidłowo zamontowana.
Rada	Rozmontuj głowicę Penguin i wyczyść ją. Po wysuszeniu części głowicy Penguin złóż ją według zaleceń instrukcji obsługi.

Awaria	Siła ssania zmniejszyła się.
Przyczyna	Element filtrujący jest zużyty.
Rada	Wymień filtr zgodnie z sekcją: "Przechowywanie i konserwacja" w Instrukcji obsługi.

Awaria	Płyn lub wydzielina z nosa dostały się do urządzenia.
Przyczyna	Nieprawidłowa pozycja urządzenia lub zbyt dużo roztworu soli.
Rada	Jeśli czujesz, że wydzielina lub płyn dostały się do urządzenia, przestań używać Nosiboo Go, wyłącz je i natychmiast skontaktuj się z obsługą klienta Nosiboo.

9. Ważne informacje na temat akumulatora

Urządzenie Nosiboo Go pracuje z akumulatorem litowo-polimerowym (7.4V, 1500mAh).

Akumulator może zostać wymieniony jedynie przez serwis specjalistyczny.

Zalecane jest włączenie i naładowanie urządzenia co najmniej co 3 miesiące, aby zachować wydajność akumulatora.

Po użyciu, lub gdy bateria urządzenia właśnie się wyczerpała, odczekaj kilka minut zanim urządzenie ochłodzi się i następnie zacznij ładowanie. 12-miesięczna gwarancja na akumulator obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe przy produkcji, nie stosuje się do ubytków wydajności.

10. Uwagi na temat ochrony środowiska

Jeśli musisz wyrzucić urządzenie, nie wyrzucaj go wraz z odpadami domowymi, ponieważ jako produkt elektroniczny kwalifikowany jest jako odpad niebezpieczny. Jest to oznaczone za pomocą następującego symbolu na opakowaniu:



Głowica Penguin nie stanowi poważnego zagrożenia dla środowiska, więc może być wyrzucona wraz z odpadami domowymi.

11. Specyfikacje techniczne

Warunki pracy:

1. Zakres temperatury: -5 °C do +40 °C
2. Wilgotność względna: 45-75%
3. Ciśnienie atmosferyczne / Zakres ciśnienia barometrycznego: 550-760 mmHg / 73-101 kPa.

Warunki transportu:

1. Zakres temperatury: -20 °C do +40 °C
2. Wilgotność względna: 45-75%
3. Ciśnienie atmosferyczne / Zakres ciśnienia barometrycznego: 150-760 mmHg / 20-101 kPa.

Warunki przechowywania:

1. Zakres temperatury: -20 °C do +40 °C
2. Wilgotność względna: 45-75%
3. Ciśnienie atmosferyczne / Zakres ciśnienia barometrycznego: 550-760 mmHg / 73-101 kPa.

Wydajność silnika: 32 W **Różnica ciśnień:** 40 mbar / 40hPa / 4kPa

Max. przepływ powietrza: 48 l/min **Zasilanie:** 100-240 V, 50-60 Hz

Akumulator: 7,4V 1500mAh akumulator litowo-polimerowy **Wy-**

dajność ładowarki DC: 8,4 W **Stopień IP:** IP21 **Klasa ochronności:**

Zasilanie wewnętrzne **Typ zastosowanych części:** BF **Zastosowane**

części: kompletna obudowa **Typ działania:** działanie nieciągłe

Długość działania: max. 25 min **Czas ciągłej pracy:** co najmniej

20 minut przy w pełni naładowanym akumulatorze **Średnia**

temperatura obudowy: 30-35°C po 1 min. ciągłego użycia **Poziom**

hałas: 55-62 dB **Spodziewany okres żywotności obudowy (części**

elektrycznych): 3 lata **Spodziewany okres żywotności głowicy Pen-**

guin: 3 miesiące **Średnica fragmentu standardowej końcówki do**

nosa przeznaczonego do nosa: max. 7,0 mm **Długość fragmentu**

standardowej końcówki do nosa przeznaczonego do nosa: max.

8,0 mm **Średnica fragmentu końcówki do nosa dla noworodków**

przeznaczonego do nosa: max. 4,9 mm **Długość fragmentu**

kończówki do nosa dla noworodków przeznaczonego do nosa:

max. 12,6 mm **Waga:** 375 g **Wymiary (obudowa, szer. x wys. x gł.):**

77 x 190 x 77 mm **Wymiary (kompletne opakowanie, szer. x wys. x**

gł.): 95 x 260 x 85 mm

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

12. Akcesoria, części zamienne

Nosiboo Go Accessory Set:

Opakowanie akcesoriów zawierające części zamienne do Nosiboo Go. <https://shop.nosiboo.eu/>



- * 1 głowica Penguin
- * 1 końcówka do nosa dla noworodków
- * 1 standardowa końcówka do nosa
- * 1 element filtrujący
- * 1 szczoteczka



NO-02-012-A6-5WCC
Ładowarka międzynarodowa

Części mogą być zamówione w specjalnym serwisie:

Attract Kft.
H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1., Węgry
Tel.: +36 72 551 642 (Pn-Pt: 8:00 – 16:00)
E-mail: customerservice@nosiboo.com

13. Przewodnik usuwania błędów

Gwarancja na urządzenie udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja jest ważna, jeżeli urządzenie było używane zgodnie z przeznaczeniem i nie ma zewnętrznych śladów urazu.

W pierwszym kroku stwierdza się istnienie usterki - czy wystąpiła w związku w winę użytkownika, czy też bez jego winy. Według poniższych wskazówek może to wykonać zarówno każdy użytkownik w domu, jak i przedstawiciel handlowy lub też jego powiernicy, po okazaniu wypełnionej karty gwarancyjnej dołączonej do dowodu zakupu. Osoba prawna zobowiązana do stwierdzenia błędu wypełnia kartę gwarancyjną dołączoną do Instrukcji obsługi lub zapewnia własny dokument gwarancji, szczegółowo opisuje kroki podjęte w ramach poszukiwania usterki oraz przekazuje je do producenta w ciągu 24 godzin.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za awarie produktów z nieautoryzowanych źródeł importu!

Co jest objęte gwarancją?

Gwarancja jest ważna wyłącznie, jeśli urządzenie było używane zgodnie z jego przeznaczeniem i nie nosi żadnych śladów uszkodzeń opisanych w sekcji "Czego nie pokrywa gwarancja". Gwarancja obejmuje usterki, które powstały wskutek błędów produkcyjnych (problemy, które były obecne w czasie, gdy urządzenie było sprzedane).

Problem

Doświadczasz "niezwykłych" sytuacji podczas używania aspiratora, np. urządzenie wyjątkowo głośno brzęczy lub tyka, trzęsie się, nie wyłącza się po 30 minutach.

Czy gwarancja jest ważna?

Jeśli doświadczasz "niezwykłych" sytuacji podczas używania urządzenia i nie nosi ono śladów fizycznych uszkodzeń zawartych w sekcji "Czego nie pokrywa gwarancja", wówczas jest objęte gwarancją.

Czego nie pokrywa gwarancja?

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Problemów wywołanych przez jego nadużycie, celowe zniszczenie, nieprawidłowe używanie i niewłaściwe warunki przechowywania gwarancja nie pokrywa. Również szkody wywołane specjalnie, przypadkowe, losowe i uboczne oraz ubytki wydajności baterii nie są objęte gwarancją.

Problem	Czy gwarancja jest ważna?
Uszkodzenie naklejki sugeruje, że obudowa urządzenia została otwarta.	Gwarancja jest nieważna z powodu używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
Ślady zewnętrznych uszkodzeń na urządzeniu wskazują na to, że obudowa urządzenia została otwarta.	Gwarancja jest nieważna z powodu używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
Nadmierne zanieczyszczenie filtra, brud w środku obudowy wskazują na to, że urządzenie było używane nieprawidłowo.	Gwarancja jest nieważna z powodu używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
Jeśli przycisk zasilania jest uszkodzony, zaciął się, połuzował lub odpadł, wskazuje to na oddziaływanie zewnętrzne; z tego powodu nie jest to objęte gwarancją. Włączanie i używanie urządzenia w tym stanie zagraża życiu!	Gwarancja jest nieważna z powodu używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.

Zadania w związku z gwarancją

Dystrybutor urządzenia Nosiboo Go musi natychmiast obsłużyć reklamacje klientów według zasad "Przewodnika rozwiązywania problemów" i "Przewodnika usuwania błędów" znajdujących się w Instrukcji obsługi. W przypadku gdy gwarancja obowiązuje, urządzenie powinno być bezzwłocznie naprawione lub wymienione. Dystrybutor urządzenia musi sporządzić notatkę o gwarancyjnym poszukiwaniu usterek. Notatka może być sporządzona na podstawie wewnętrznej dokumentacji dystrybutora lub na podstawie karty gwarancyjnej w Instrukcji obsługi. W każdym przypadku należy opisać zaobserwowaną usterkę, wpisać dokładną datę i zapisać unikalny numer seryjny, znajdujący się w dolnej części urządzenia.

Dane kontaktowe do serwisu

Attract Kft.
H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1., Węgry
Tel.: +36 72 551 642 (Pn-Pt: 8:00 – 16:00)
E-mail: customerservice@nosiboo.com

14. Międzynarodowy certyfikat gwarancji

Nosiboo Go jest wyrobem medycznym higienicznym. Możesz dokonać zwrotu tylko jeśli urządzenie jest nieuszkodzone oraz końcówka do nosa jest nierozpakowana. Ze względu na higienę nie wymieniamy produktu wyjętego z folii. Wskazówki i obowiązujące przepisy: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu 2011/83/EU § 16 (e) Republika Austrii: FAGG: § 18 (1) 5. Węgry: 45/2014. (II. 26.) Rozporządzenie rządu § 29 (1) (e).

Karta gwarancyjna: <https://pl.nosiboo.eu/downloads/>